



KE-Chair Tahliye Sandalyesi




K
E
-
C
h
a
i
r

T
A
H
L
I
Y
E

S
A
N
D
A
L
Y
E
S
I

KE-Chair Tahliye Sandalyesi EasyMove CO.,LTD tarafından Güney Kore'de üretilmektedir. EasyMove CO.,LTD bir HYUNDAI MOTOR GROUP sosyal sorumluluk girişimidir.



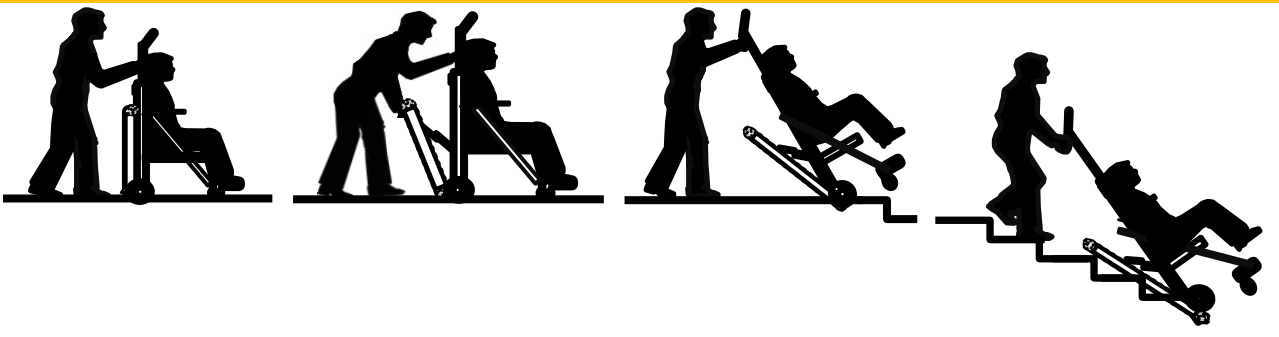

KE-Chair acil durum ve afetlerin sıklıkla yaşandığı ülkemizde; **kendiliğinden kaçamayacak durumda olan hamileler, bedensel engelliler, hastalar, yaşlılar ile yaralıların** binalardan hızlı ve etkin bir şekilde tahliyesi için tasarlanmış bir acil durum donanımı olmasının yanında, hastaneler ve huzur evlerinde de gündelik kullanıma uygun bir donanımdır.


❖ KE-Chair



❖ Fonksiyon

Katlanabilir	Eğim Açısı Ayar Kolu	Yükseklik Ayar Kolu	Kılıf	Kabin
--------------	----------------------	---------------------	-------	-------



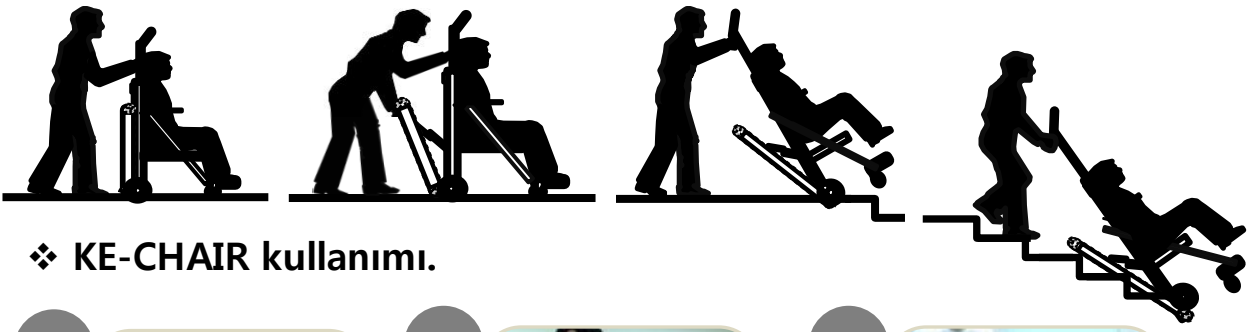

❖ KE-CHAIR kullanımı.

1



Kılıfı çıkarın veya KE-Chair'i kabinin dışına alın.

2



Oturağı ve dirseklığı açın.

3



Taşınanı sandalyeye oturtun.

4



Merdiven inişi öncesi kauçuk palet şasesinin eğim açısını ayarlayın.

5



Taşıma kolunun kavrayarak sandalyeyi arka şase üzerinde basamakların üzerine kaydırın.

6



Güvenli şekilde merdivenden aşağı indirin.

※ Acil durumda kullanmak üzere, birden fazla personeli belirleyin ve eğitimler ile kullanımı konusunda tecrübelendirin.



Nerede bulundurulmalı.

KE-Chair hızla ulaşılabilecek şekilde ve sürekli belirlendiği alanda bulundurulmalı, kılıf veya kabin ile muhafaza edilmelidir.



UYARI



Acil durumda asansörleri kullanmayın, tahliye için acil çıkış merdivenlerini kullanın.

Tahliye sedyesi, bir acil durum tahliyesinde sadece bedensel engelliler için değil, yaralılar, hamileler, sağlık sorunu olanlar ve yaşlılar içindir. Kaçabilenler tahliye merdivenlerinden kaçarken, onların merdiveni kullanabilmeleri mümkün değildir. **Onları geride mi bırakacaksınız ?!!**

DİKKAT



- Keskin dönüşler ve spiral merdivenlerde daha dikkatli olunmalıdır.
- Kullanıcı yüksek topuklu ayakkabı giymiyor olmalıdır.
- Taşınan 150 kg den ağır ise kullanılmamalıdır.
- Kullanıcı, nasıl kullanıldığını anladıktan sonra taşımaya başlamalıdır, aksi takdirde ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

KE-Chair	Kapasite	150kg	Yükseklik	115~142cm
	Ağırlık	11.5kg	Derinlik	58cm
	Derinlik (katlı iken)	17cm	Arka Şase Uzunluğu	42~56cm
	Uzunluk	80cm	Dirseklik Uzunluğu	27cm
Kabin		120*65*22cm ³ (Y*G*D)		

Ana sayfa	Video
www.tahliyesandalyesi.com	Lütfen videoyu izleyin. http://www.youtube.com/watch?v=TA8X3r0LjBk